

Vyšetření reakcí imunoblot



příprava stripů





vkládání stripů do reakční vaničky

pipetování vzorků



Reakce probíhá automaticky v přístroji (Autoblot)

lepení stripů na šablonu pro odečet

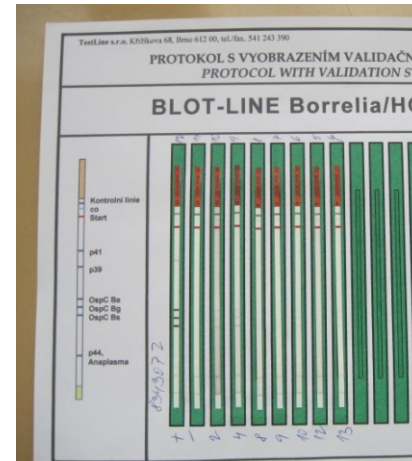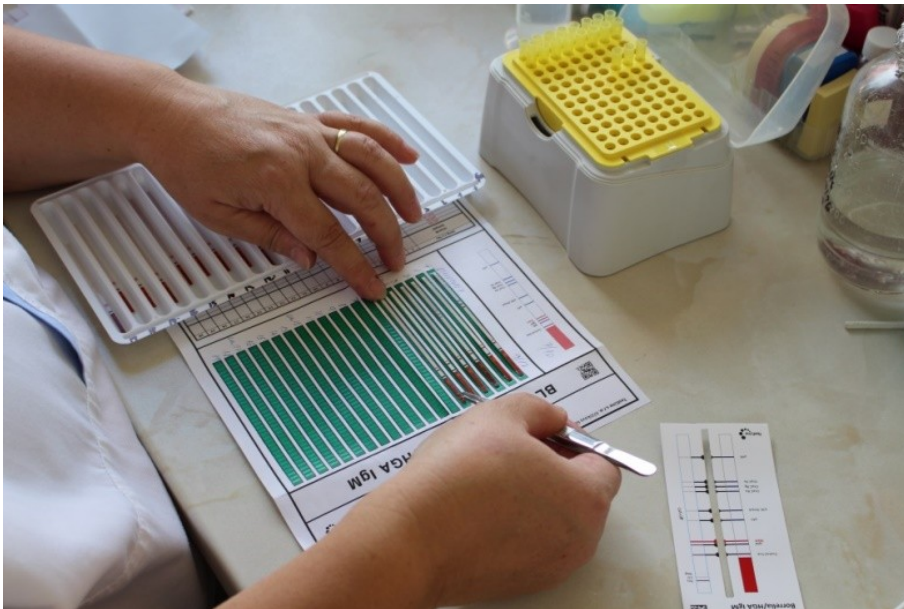

BLOT-LINE Borrelia/HGA IgG
 Sarže: 726293X
 Vyhotovil: Dvořáková
 Čas vyhodnocení: 11.11.2013 13:38:12

Snímek skenu(1 - 10):

	Vzorek č. 1	Vzorek č. 2	Vzorek č. 3	Vzorek č. 4	Vzorek č. 5	Vzorek č. 6	Vzorek č. 7	Vzorek č. 8
Výsledky(1 - 10):								
Označení	K+	K-	1	3	5	6	7	9
VitB Ba	47,53[P]	0,00[N]	0,76[N]	43,66[P]	34,38[P]	25,89[P]	18,22[P]	0,00[N]
VitB Bg	44,13[P]	0,76[N]	0,00[N]	38,06[P]	28,87[P]	20,83[P]	11,97[N]	0,51[N]
VitB Bs	30,46[P]	0,76[N]	0,00[N]	22,65[P]	15,20[P]	6,07[N]	7,53[N]	0,00[N]
p39	16,71[P]	0,00[N]	0,00[N]	11,64[N]	0,62[N]	1,73[N]	1,44[N]	0,00[N]
p41	28,52[P]	1,37[N]	1,94[N]	20,09[P]	29,20[P]	11,61[N]	2,36[N]	0,52[N]
p39,DbpA	3,37[N]	0,00[N]	0,00[N]	2,15[N]	0,00[N]	0,76[N]	2,36[N]	0,00[N]
OspB	4,89[N]	0,00[N]	1,37[N]	3,61[N]	0,62[N]	2,49[N]	1,90[N]	4,71[N]
OspA Ba	3,01[N]	0,00[N]	0,76[N]	3,75[N]	0,62[N]	3,52[N]	2,81[N]	4,79[N]
OspA Bg	6,83[N]	0,00[N]	12,37[N]	3,61[N]	4,98[N]	6,83[N]	1,44[N]	4,08[N]
OspA Bs	10,38[N]	0,00[N]	0,00[N]	8,51[N]	0,76[N]	3,01[N]	1,90[N]	1,73[N]
OspC	2,76[N]	0,00[N]	0,00[N]	1,11[N]	0,76[N]	0,00[N]	2,02[N]	0,76[N]
p17,DbpA	0,57[N]	0,00[N]	0,00[N]	0,00[N]	0,76[N]	0,00[N]	0,00[N]	0,76[N]
p44	19,72[P]	0,76[N]	0,76[N]	1,11[N]	0,76[N]	0,00[N]	2,07[N]	0,76[N]
Typ17	2,56[N]	0,00[N]	26,76[P]	1,19[N]	0,76[N]	0,00[N]	1,11[N]	0,00[N]
Borrelia	Positivní	Negativní	Negativní	Positivní	Positivní	Positivní	Horizční	Negativní
Anaplasma	Positivní	Negativní	Negativní	Negativní	Negativní	Negativní	Negativní	Negativní
Trpograma **	Negativní	Negativní	Positivní	Negativní	Negativní	Negativní	Negativní	Negativní

hodnocení výsledků