

## Vyšetření RF pomocí latexového kitu

Metoda: nepřímá aglutinace

### Provedení:

- sérum pacienta nařed'te dvojkovou geometrickou posloupností (řadou) od 1:10 do 1:40 fyziologickým roztokem
- na černou podložku se 4 reakčními místy nakapejte na jednotlivá reakční místa 0,05 ml nařaděných sér a na 4. reakční místo nakapejte 1 kapku pozitivní kontroly ze setu (již je naředěna)
- na každé reakční místo přidejte 1 kapku latexových částic ze setu.
- kývavými pohyby dobře promíchejte – s přestávkami míchejte asi 3 minuty
- nechejte 5 minut stát a poté odčtěte titer protilátek