

Základní koagulační testy -postupy

PT

PIPETOVAT DO KYVET:

- 50 μ l plazmy
- inkubace 2 min. při 37°C
- 100 μ l Ca²⁺ tromboplastin (37 °C, promíchaný) současně startovat stopky

APTT

PIPETOVAT DO KYVET:

- 50 μ l plazmy
- 50 μ l APTT reagencie (promíchaná)
- inkubace 3 min. při 37°C
- 50 μ l CaCl₂ 0,025 mol/l (37°C) současně startovat stopky

FIBRINOGEN

Naředit plazmu 1: 20:

100 μ l vyš. plazmy + 1,9 ml Owren – veronal pufru

PIPETOVAT DO KYVET:

- 100 μ l ředěné plazmy
- inkubace 2 min. při 37°C
- 50 μ l trombinu (laboratorní teplota) současně startovat stopky