

datum _____ jméno _____

Téma praktika:

Radioimunoanalýza (RIA) - stanovení aldosteronu

1. Nastavení metody na gamaměřiči LB 2111

Nadefinování metody, typu kalibrace, zadání cílových hodnot kalibrátorů, nastavení kontrol.
Seznámení s přístrojem - princip, validace přístroje.

2. Vlastní provedení stanovení aldosteronu v patientských vzorcích

Okruhy k nastudování a dotazy:

1. Jaká značenka se v RIA používá nejčastěji?
2. Co je to ionizující záření?
3. Jaká jsou specifika pro γ -záření (jakých je energií, jaké vlnové délky, propustnost)?
4. Co se děje při „fotoefektu“ a při „Comptonově rozptylu“?

Přístroje a pomůcky:

Gama (γ -) měřič LB 2111 multidetektorový gama měřič (γ -counter) pro radioimunoanalýzu
Souprava na stanovení aldosteronu (Immunotech)
Vzorky sér

Teorie, princip stanovení

Stanovení aldosteronu v séru nebo plazmě (heparin, EDTA) soupravou RIA (dodává Immunotech). Principem stanovení je kompetitivní radioimunoanalýza.

Standardy, kontrolní vzorky a vzorky plazmy/séra se inkubují ve zkumavkách potažených monoklonální protilátkou společně s radioindikátorem ^{125}I , který je navázán na antigen - anti-aldosteron. Po inkubaci se odsaje obsah zkumavek a změří se vázaná radioaktivita vyjádřená v jednotkách *cpm*. Naměřená radioaktivita je nepřímo úměrná koncentraci analytu.

Princip scintilačního detektoru

γ -counter Berthold (LB 2111) slouží ke kvantitativnímu měření radioaktivity γ -záření (vyjádřeno v jednotkách *cpm*). γ -counter Berthold je vybaven scintilačním detektorem, který je založen na vzniku luminiscence při průchodu ionizujícího záření vhodnou látkou (scintilátorem). Pro detekci γ -záření se jako scintilační jednotky používají krystaly NaI/Tl. Při průchodu záření gama scintilačním krystalem dochází k fotoefektu a ke Comptonově rozptylu. Elektrony uvolněné z atomových obalů excitují atomy krystalu, přitom vzniká viditelné luminiscenční záření zvané *scintilace*. Pro přeměnu scintilací na elektrické impulsy se používají fotonásobiče. Systém LB 2111 je vybaven 12 scintilačními jednotkami a fotonásobičem.

Reagencie

1. **Zkumavky potažené protilátkou proti aldosteronu:** 2x 50 zkumavek.
2. **Radioindikátor - značený ^{125}I : 1 lahvička (55 ml);** připravená k použití.
Lahvička obsahuje aktivitu 165 kBq (ke dni výroby) aldosteronu značeného ^{125}I roztoku s hovězím sérovým albuminem, obsahuje azid sodný.
3. **Standardy: 6 lahviček (0,5 ml):** kalibrační rozmezí 0 - 6,93 nmol/l. Koncentrace lyofilizovaného aldosteronu s azidem sodným (< 0,1%) jsou uvedeny na lahvičkách.

4. **Kontrolní vzorky: 1 lahvičky (0,5 ml):** před použitím rozpustit v destilované vodě, její objem je uveden na lahvičce. Aktuální koncentrace lyofilizovaného aldosteronu je znázorněna na lahvičce.

Všechny reagentie soupravy uschovávejte v lednici při 2-8 °C. Aktuální koncentrace standardů a kontrolních materiálů jsou zaznamenány na lahvičkách.

Pracovní postup

1. Nechte všechny reagentie vytemperovat na laboratorní teplotu.
2. Očišťujte duplikátní sérii potažených zkumavek. Do každé zkumavky napipetujte **50 µl kalibrátoru, kontrolních vzorků a patientských sér. Nachystejte si zkumavku pro celkovou aktivitu (Total; T).**
3. Do každé zkumavky napipetujte **500 µl radioindikátoru ¹²⁵I.**
4. Zkumavky promíchejte na vortexu, zakryjte parafilmem a nechte inkubovat v třepačce na 3 hodiny.
5. Odsajte obsah všech zkumavek, s výjimkou zkumavky pro celkovou aktivitu (T).
6. Zvolte vyhodnocovací program **RIA Aldoimuno** a změřte radioaktivitu zkumavek – na γ -counteru nastaveném na ¹²⁵I po dobu 1 minuty. Tím získáte vázané **cpm (B)** a **cpm** pro celkovou aktivitu (**T**).

Schéma pracovního postupu

Krok 1 Dávkování	Krok 2 Inkubace	Krok 3 Měření
Do potažených zkumavek dávkujte: <ul style="list-style-type: none"> • 50 µl vzorku séra/plazmy, standardu, kontrolního vzorku • 500 µl radioindikátoru ¹²⁵I • zakryjte parafilmem 	Inkubujte 3 h při 18-25°C za stálého třepání.	Pečlivě odsajte obsah zkumavek, promyjte pomocí promývacího roztoku a znovu odsajte obsah zkumavek. Změřte vázané <i>cpm</i> (Bound; B) a celkové <i>cpm</i> pro celkovou aktivitu (Total; T) po dobu 1 min.

Vyhodnocení

Vyhodnocení se provádí pomocí kalibrační křivky, kdy na osu x se vynášejí koncentrace v nmol/l a na osu y poměr B/B₀.

Přepočítací faktor: nmol/l = pg/ml x 0,002774

	Total	B ₀	Std1	Std2	Std3	Std4	Std5
Impulzy							
c (teoretické)							
c (naměřené)							

Vzorky	Impulzy	c (naměřené)

Kontroly	Impulzy	c (naměřené)
K1		
K2		

3. **Klinická interpretace: referenční meze; uvést příklady ↓ a ↑ klinických hodnot.**
4. **Proč rozlišujeme referenční meze aldosteronu vleže a ve stoje? A kdy jsou vyšší?**
5. **Kdy jsou koncentrace aldosteronu u pacientů mnohonásobně vyšší - čím je to způsobeno?**
6. **Popis bezpečnosti v RIA laboratoři (příklad kontrolní test ověření znalostí), monitorování pracovního prostředí v RIA laboratořích.**
7. **Fyzikální poločas rozpadu ¹²⁵I je? Jaké jsou výhody a nevýhody stanovení RIA?**