

Základní koagulační testy -postupy

PT

PIPETOVAT DO KYVET:

- 50 µl plazmy
- inkubace 2 min. při 37°C
- 100 µl Ca²⁺ tromboplastin (37 °C, promíchaný) současně startovat stopky

APTT

PIPETOVAT DO KYVET:

- 50 µl plazmy
- 50 µl APTT reagencie (promíchaná)
- inkubace 3 min. při 37°C
- 50 µl CaCl₂ 0,025 mol/l (37°C) současně startovat stopky

FIBRINOGEN

Naředit plazmu 1: 20:

100 µl vyš. plazmy + 1,9 ml Owren – veronal pufru

PIPETOVAT DO KYVET:

- 100 µl ředěné plazmy
- inkubace 2 min. při 37°C
- 50 µl trombinu (laboratorní teplota) současně startovat stopky