

## **Základní koagulační testy -postupy**

### **PT**

PIPETOVAT DO KYVET:

- 50  $\mu$ l plazmy
- inkubace 2 min. při 37°C
- 100  $\mu$ l Ca<sup>2+</sup> tromboplastin (37 °C, promíchaný) současně startovat stopky

### **APTT**

PIPETOVAT DO KYVET:

- 50  $\mu$ l plazmy
- 50  $\mu$ l APTT reagensie (promíchaná)
- inkubace 3 min. při 37°C
- 50  $\mu$ l CaCl<sub>2</sub> 0,025 mol/l ( 37°C) současně startovat stopky

### **FIBRINOGEN**

Naředit plazmu 1: 20:

100  $\mu$ l vyš. plazmy + 1,9 ml Owren – veronal pufru

PIPETOVAT DO KYVET:

- 150  $\mu$ l ředěné plazmy
- inkubace 2 min. při 37°C
- 50  $\mu$ l trombinu (laboratorní teplota) současně startovat stopky